

# iCOCOON

家庭用医療機器

## アイコクーン



リラクゼーションチェア

ICO-10000

### 取扱説明書

添付文書

このたびは、アイコクーンをご利用いただき誠にありがとうございます。

“心と身体の健康”を目的とし、デザインとメディケーションを融合した高級家具調リラクゼーションチェアです。

まゆ（繭）から蝶が羽ばたくようにそこに座るだけで新しい自分に生まれ変わる世界にひとつだけの座り心地。

10歳から100歳までの全ての人々に対して、座るだけで幸せを感じられる必需品としてご家族皆様でお楽しみいただき末永くご愛用ください。

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（3～8ページ）を必ずお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- この製品は、日本国内の弊社工場にて企画・開発・設計から最終組み立て、及び品質保証までをおこなっております。
- この製品は、一般家庭用として設計されています。一般家庭以外（業務用等）でご使用の場合は、お買い上げの販売店または「修理等に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

日本国内専用

この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。

PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.

この製品は、日本国内においてのみ有効です。

よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。

JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.

WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.

Massage  
+  
Medical



## もくじ

### ご使用前に

- 安全上のご注意 ..... 3
- 各部のなまえとはたらき ..... 9
- マッサージをはじめる前に ..... 12
- モニターの使い方 ..... 17
- 初回個人設定 ..... 18

### アイコンの使い方

- アイコンマイポジション調整画面 .. 22
- アイコンコースメニュー ..... 25
- コースを使ってみよう ..... 33
- サブボタンメニュー ..... 34
- Bluetooth® 設定 ..... 39

- お手入れと保管のしかた ..... 43

- Q&A ..... 44

- 故障かな?と思ったら ..... 46
- 保証とアフターサービス ..... 48
- 仕様 ..... 49
- 安全のために商品の点検を ..... 50
- 保証書 ..... 52(裏表紙)
- お問い合わせ窓口 ..... 52(裏表紙)

## おもな特長

極上のリラクゼーション空間を演出

### 光・音楽・1/fゆらぎによるリラクゼーション

～光と音楽による入眠と覚醒のアプローチ～

奈良県立医科大学の大林先生の監修のもと、入眠や活性化といった生体リズムに合わせた光のプログラムを導入。

～1/fゆらぎ機能～

座面シートを当社独自の技術により1/fゆらぎを実現。

不規則で繊細な癒しのコンビネーションと科学の融合が、至福のひとつときを彩ります。

～優しい刺激の「メディテーションコース」～

やさしい刺激を与えるマッサージ機能を駆使し、日常の疲れで凝り固まった筋肉をゆるめ、呼吸のリズムを整え心身のリラクゼーションへと導きます。



究極の座り心地(クッション性)を実現

### 姿勢サポート



8つのエアセルがあなたに合ったポジションを自動でつくります。

# 安全上のご注意






- ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
- 次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
- 各部の名前については9～11ページをご覧ください。

	<b>警告</b>	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
	<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

## 図記号の種類と意味

	禁止	禁止の行為であることを示しています。		禁止	風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。
	強制	行為を強制したり指示したりするものです。		プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	分解禁止	分解してはいけないことを示しています。		アース取り付け	アースを取り付けることを示しています。
	ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。			

## ご使用場所の注意

 <b>注意</b>		
	禁止	浴室やサウナ、湿気が多い場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。
	強制	床面が水平な場所に置いて使用してください。不安定な場所では本機が転倒し事故の原因になります。
	アース取り付け	万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。詳しくは、別冊の設置説明書をご覧ください。
	禁止	アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

## ご使用前の注意点



### 警告



禁止

- 次の人は使用しないでください。
  - (1) 医師からマッサージを禁じられている人  
例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕等。
  - (2) 急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人
- 電源は交流100V以外では使用しないでください。  
火災や感電の原因になります。
- 変圧器を用いた使用はしないでください。  
故障や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいとき等は使用しないでください。  
感電やショート・発火の原因になります。
- マッサージの前には必ず施療部の生地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に生地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでも勝手に修理などせずただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。施療部の生地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。  
生地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。



強制

- 次の人は、使用前に医師に相談してください。
  - (1) 心臓に障害のある人
  - (2) 糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
  - (3) 骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性【とう（疼）痛性】疾患の人
  - (4) 施療部位に創傷のある人
  - (5) 体温38℃以上（有熱期）の人  
例：急性炎症症状【けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動等】の強い時期にある人。衰弱している人
  - (6) 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
  - (7) ペースメーカー等の電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
  - (8) 背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
  - (9) かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人
  - (10) 悪性のしゅよう（腫瘍）のある人
  - (11) 安静を必要とする人
  - (12) 内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）等の急性症状のある人
  - (13) 温度感覚喪失が認められる人
  - (14) 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人
  - (15) リウマチ症、痛風等により関節が変形している人
  - (16) めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人
  - (17) 捻挫、肉離れ等の炎症性の人
  - (18) 腱鞘炎、またはそのおそれのある人
- 特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
- しばらく使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

## ご使用前の注意点


**注意**


禁止

- この取扱説明書の使用方法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布等を併用しないでください。  
体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。
- 人をのせたまま移動しないでください。  
本機の転倒により、事故やケガの原因になります。
- フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。  
フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本機の転倒により事故やケガの原因になります。
- 付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。また、付属品は他の医療機器と組み合わせて使用しないでください。



強制

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。  
故障や感電の原因になります。
- 電源プラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。  
感電やショート・発火の原因になります。
- ご使用前には別冊の設置説明書にしたいが全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。
- マッサージ中は体調に応じて、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。  
はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。
- 安全のために、メカの位置を確認し、収納位置にない場合は、主電源スイッチを入れ、機器が正常に動作することを確認してからゆっくり座ってください。
- 椅子に腰掛けるときに、フットレストの上にいる、立つ、座る等の行為はしないでください。  
転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
- しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。
- ご使用前には、必ず背もたれを完全に起こし、フットレストを完全に下ろしてください。

# つづき (安全上のご注意)

## ご使用時の注意点

### 警告



禁止

- 電源コードを本機に巻きつけたり、本機の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 本機や本体リモコンに水等をこぼさないでください。感電やショート・発火の原因になります。
- お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本機の上や本機の周辺(背もたれの後ろやフットレストの下部)で遊ばせたり、本機の上に乗せたり、座らせたりしないでください。ただし、メディテーション、子どもコースに限り、10歳以上のお子様を使用することができます。その場合、必ず保護者が付き添ってください。事故やケガの原因になります。
- 椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様(乳児等)を抱きかかえてのご使用はおやめください。事故やケガの原因になります。
- 生地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。事故やケガ・感電の原因になります。修理は『修理等に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)にご相談ください。
- フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。



ぬれた手禁止

- ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。感電や故障の原因になります。



強制

- マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。事故やケガの原因になります。
- 身体や物がはさまりこまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。

### 注意






禁止

- 素肌では使用しないでください。
- マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。事故やケガの原因になります。
- 頭部、胸部、腹部、関節部(ひじ、ひざ等)には使用しないでください。気分が悪くなったり、ケガの原因になります。
- もみ玉が上下する部分、リクライニングやメカ等の可動部に手や足を入れしないでください。また、髪飾り、ピアス、イヤリング、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪、装飾品などのかたい物をつけて使用しないでください。ケガの原因になります。
- アームレストは腕以外には使用しないでください。ケガの原因になります。



## ⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フットレストは脚部以外には使用しないでください。 ケガの原因になります。</li> <li>● アイコクーンを無人で動作させないでください。 事故やケガの原因になります。</li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 緊急時や動作中に異常を感じたときは、本体リモコンの[急停止]ボタンを押して、動作を停止させてください。その後、入/切ボタンを押すと、リクライニングが起き上がります。</li> <li>● 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。</li> <li>● マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。</li> <li>● マッサージ中は眠らないように注意してください。 ケガの原因になります。</li> <li>● マッサージは、1日30分以内にしてください。同一箇所へ連続してのご使用は5分以内にしてください。長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、1回程度を目安にご使用ください。</li> <li>● 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れしないでください。 無理に入れようとすると、故障の原因になります。</li> <li>● 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。 無理に入れようとすると、故障の原因になります。</li> <li>● 首の周辺をマッサージするときはもみ玉の位置に注意し、のどや首の前方をマッサージしないでください。</li> <li>● 外部音源をご利用の際は、接続前に外部音源の音量を下げてください。 外部音源の音量を上げ過ぎた状態で接続すると突然大きな音が出て耳をいためる原因になることがあります。</li> </ul>
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。</li> <li>● 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して、主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>● 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。 感電や漏電・ショート等による火災のおそれがあります。</li> </ul>

# つづき (安全上のご注意)

## ご使用後や使用しないときの注意点



### 注意

 禁止	● 電源コードは本機以外では使用しないでください。
	● 本機を使用後は、必ず背もたれを完全に起こし、フットレストを完全に下ろしてください。
	● 使用後はよごれを取り、湿気の少ないところに保管してください。
	● 本機に物を載せないでください。
	● コード類はねじれをほどいて保管してください。
 プラグを抜く	● 使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
	● 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電やショートによる火災の原因になります。
	● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
	● ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

## その他の注意点



### 警告

 禁止	● 本機の上に立たないでください。座部以外に座る等して、上から強い衝撃を与えないでください。 転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
	● 電源コードが破損した場合、危険ですので使用を中止してください。『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に電源コードの交換の依頼をしてください。
 分解禁止	● 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に連絡してください。
	● 機器は改造しないでください。 火災や感電、ケガの原因になります。


## お願い






製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

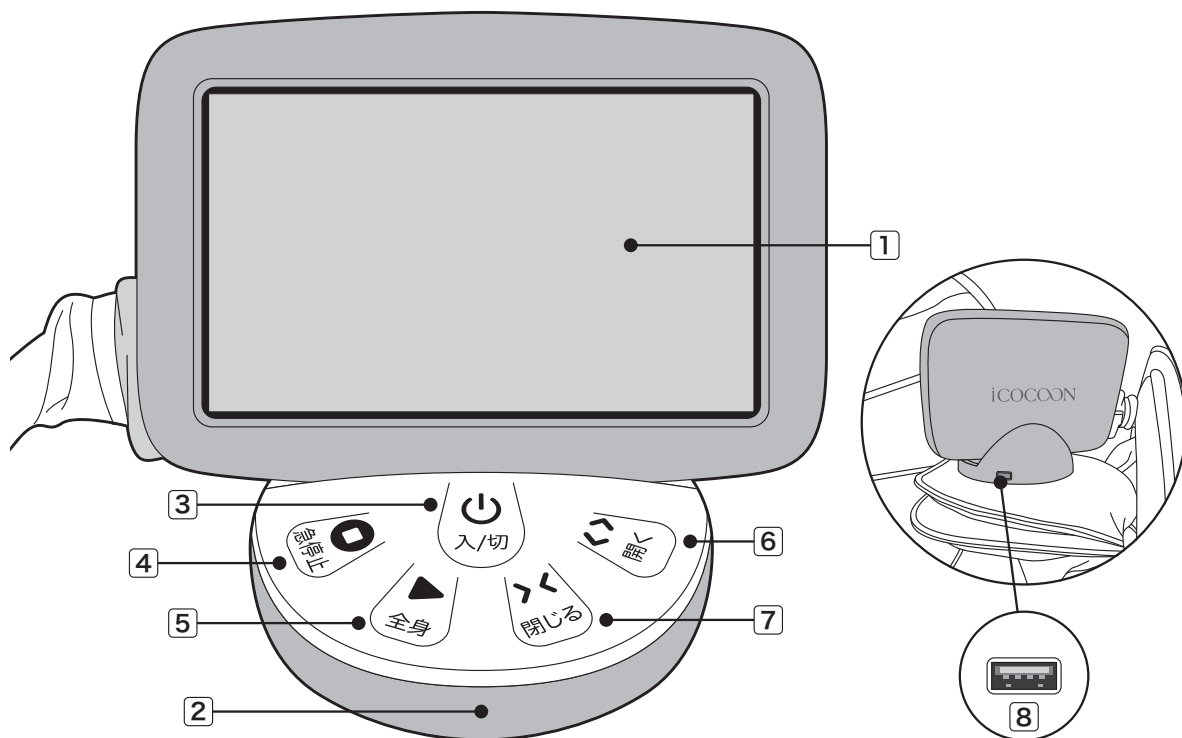

# 各部のなまえとはたらき

## モニター/本体リモコン




①	モニター(付属品)	画面を押して、操作をおこないます。
②	本体リモコン	本体を操作し、モニターを設置することもできます。
③	 入/切ボタン	本体の電源「入/切」をおこないます。電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態では消灯します。電源を切るとリクライニングともみ玉が収納状態に戻ってから停止します。急停止中に押すと、リクライニングが起き上がります。
④	 急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。急停止状態では赤色に点滅します。
⑤	 全身ボタン	疲労回復を目的とした、全身のマッサージをおこないます。
⑥	 開くボタン	サイドパネルが開きます。押し続けている間、開きます。
⑦	 閉じるボタン	サイドパネルが閉じます。押し続けている間、閉じます。
⑧	USBポート	このポートは、カスタマーサポート用の通信ポートです。お客様はご使用にならないでください。

# つづき (各部のなまえとはたらき)

使用前に

## 本体(正面)

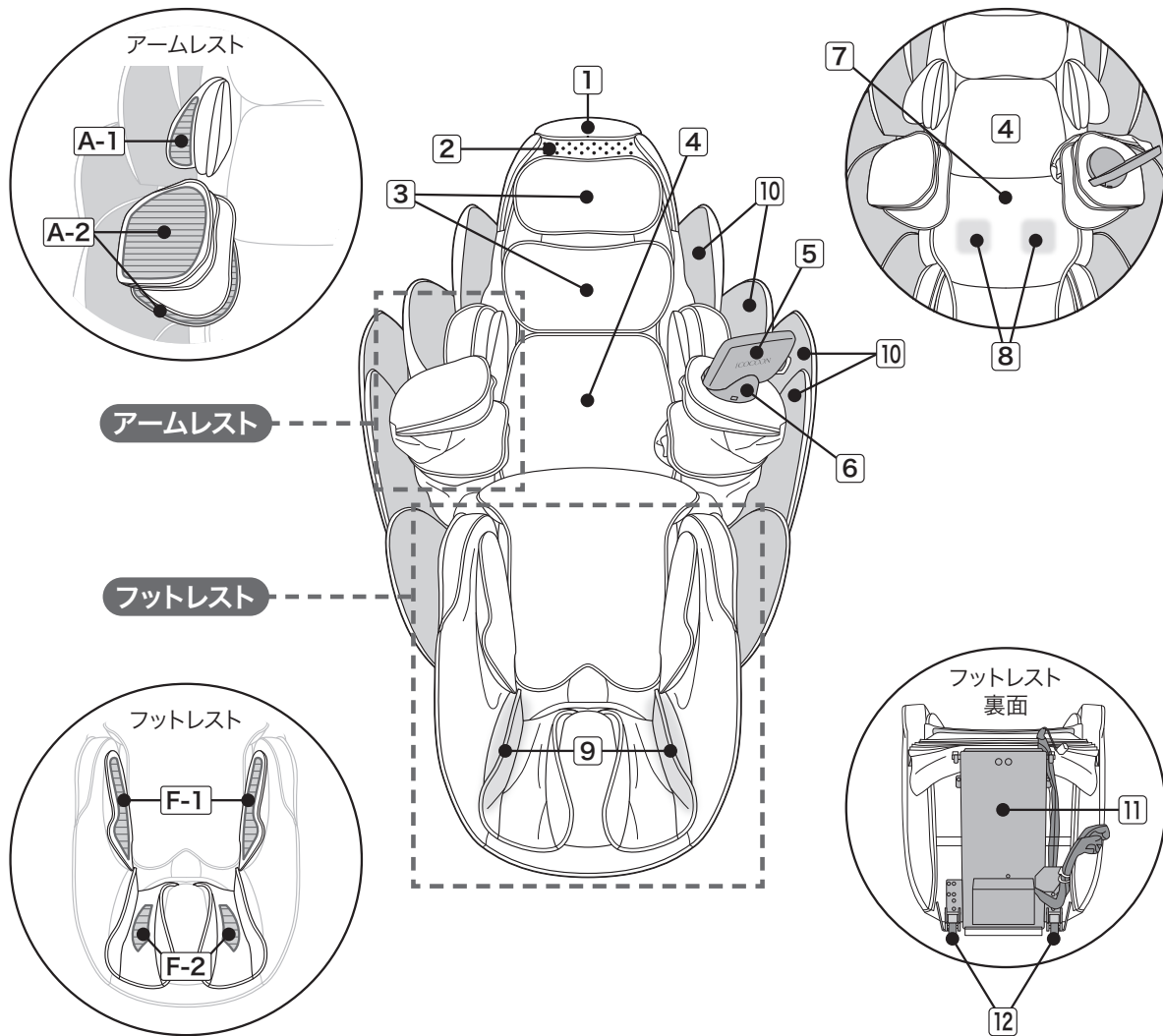

1	トップパネル
2	スピーカー
3	まくら
4	背クッション

5	モニター(モニターケーブル付き)
6	本体リモコン
7	座クッション
8	座面ヒーター

9	足元ヒーター(左右)
10	サイドパネル(左右)
11	フットスライド
12	キャスター(左右)


### アームレスト

A-1	肩メカ(左右)
A-2	腕メカ(左右)

### フットレスト

F-1	ふくらはぎメカ(左右)
F-2	足裏メカ(左右)

## 本体(背面)

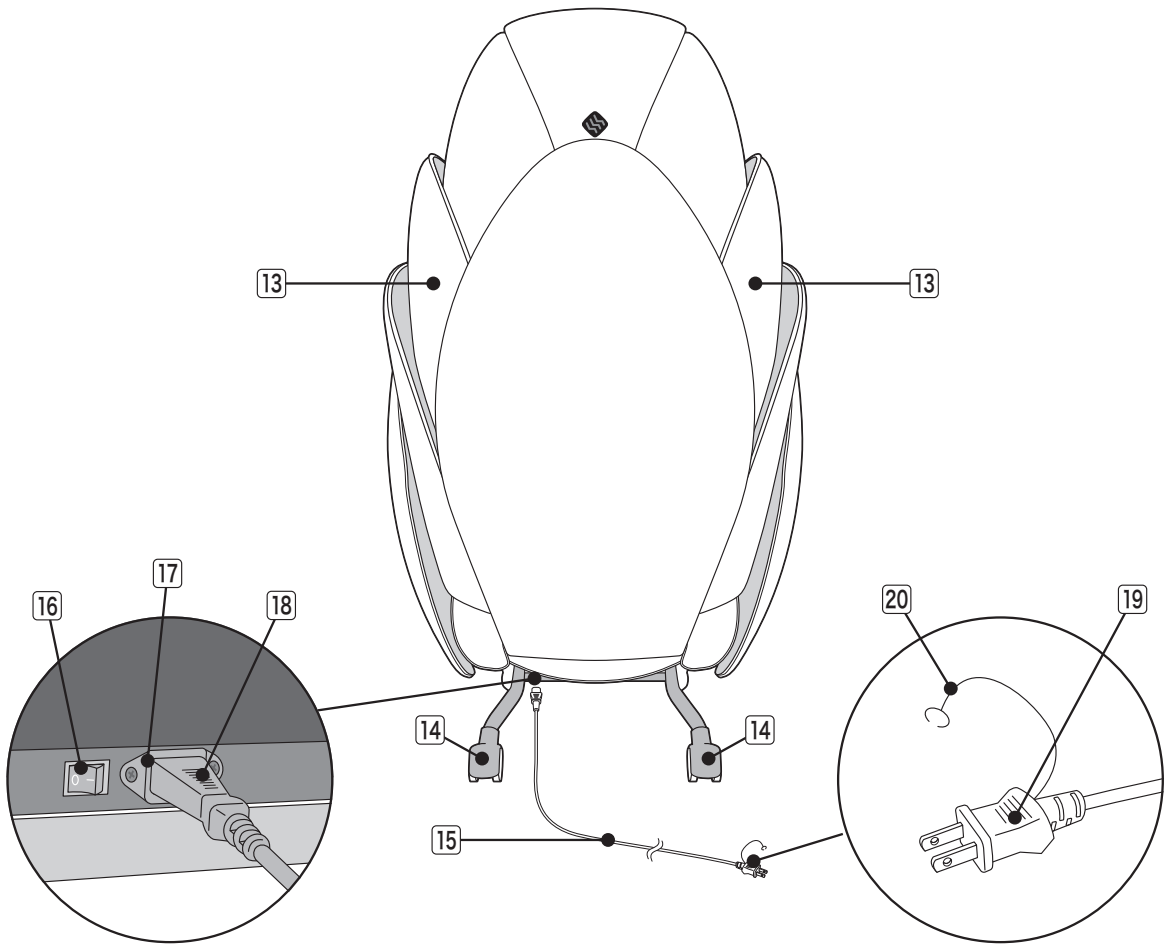

13	サイドパネル(左右)
14	キャスター(左右)
15	電源コード
16	主電源スイッチ


17	インレット
18	コネクタ
19	電源プラグ
20	アース線

## エアースセル

### エアースセル

K-1	まくらエアースセル
K-2	腰右エアースセル
K-3	腰左エアースセル
K-4	座右エアースセル


K-5	座左エアースセル
K-6	座前エアースセル
K-7	背クッションエアースセル
K-8	座クッションエアースセル

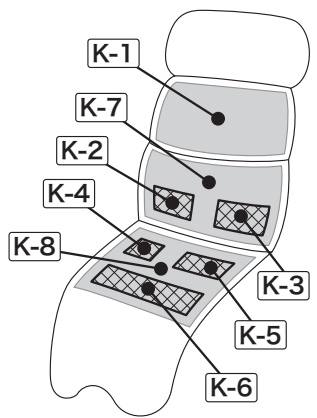

# マッサージをはじめる前に

## 周囲を確認する

本体の後ろや脚部の前など、周囲に人やペットがいないか、物が無いことを確認してください。

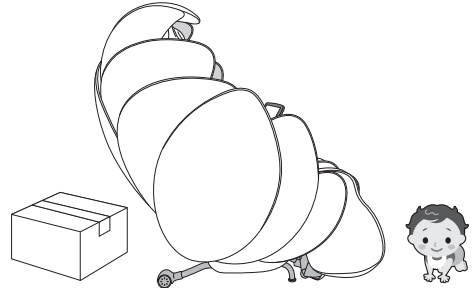

## 電源を入れる

### ⚠ 警告


- 電源は交流100V以外では使用しないでください。→火災や感電の原因になります。
- 変圧器を用いた使用はしないでください。→故障や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいとき等は使用しないでください。→感電やショート・発火の原因になります。

### ⚠ 注意

- 冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々にあげてください。→動作部に結露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。


## 1 電源プラグを差し込み、電源プラグから出ているアース線を電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、電源プラグにほこりが付いていないか確認する。
- 万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

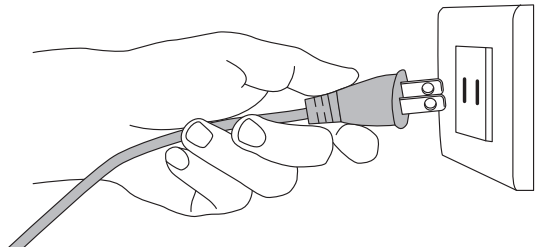

### 電源コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアース線を電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでいないか、ときどき点検してください。

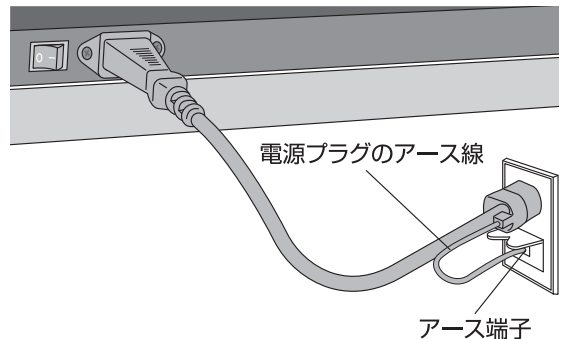


### 電源コンセントにアース端子がない場合

『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。

- 電源コードは、必ず本機器に付属のものをご使用ください。
- とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しないでください。
- アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。

## 2 本体の主電源スイッチを **ON** にする。

- 主電源スイッチは本体後側にあります。

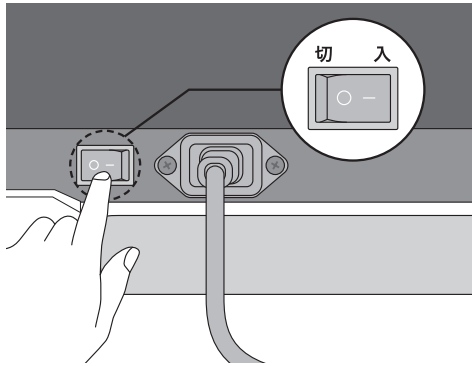

## 3 モニターの画面が表示されます。

- 何も操作をしないまま一定時間が経過すると、画面が真っ暗になります。画面を押すと明るい状態に戻ります。

※詳細は、Q&Aに記載しています。



### 本体を確認する

## 1 本体の生地が破れていないか確認する。

- ご使用前には必ず本体生地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に生地の破れがないことを確認してください。

### 警告

- どんな小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。

→本体生地をはずしたり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

## 2 本体に異物が挟まっていないか確認する。

### 注意

- 使用前に本体に異物がはさまっていないか確認してください。

→事故やけがのおそれがあります。

## 3 各メカが収納位置にあることを確認する。

メカの収納位置

- 背メカ…背もたれ下部
- 足裏メカ…開いた状態

### 注意

- 各メカが収納位置にあることを確認してから座ってください。

→事故やけがのおそれがあります。

## 4 背もたれが完全に起き上がり、フットレストが完全に下がった状態にあることを確認する。

※電源入の状態では、サイドパネルが開き、まくら・背クッション・腰クッションにエアが入ります。

### 注意

- フットレストが完全に下がっていないときに、フットレストの上に座ったり、立ったり、物をのせたりしないでください。

→事故やけがのおそれがあります。


# つづき (マッサージをはじめる前に)

ご使用前に

## 椅子の座り方・降り方

各メカは通常、収納状態にあります。 背メカ…背もたれ下部、足裏メカ…開いた状態

安全のため、座る前に各メカの位置を確認し、収納状態以外の場所にある場合はすぐに座らず、主電源スイッチを入れて、各メカを収納状態に戻してください。本体リモコンの入/切ボタンを押すと、自動でパネルが開き、まくら・背クッション・腰クッションにエアが入りますので、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

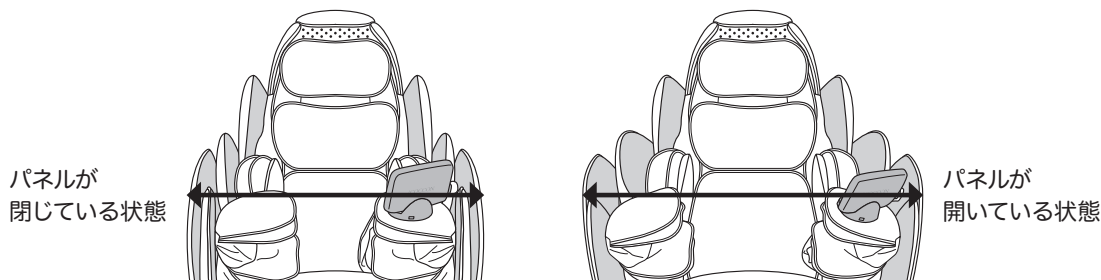


### ⚠ 注意

- フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。  
→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
- ご使用前は背もたれを完全に起こしてください。

## 椅子への乗り降りの際の注意点

- 1 フットレストが完全に下がった状態にあることを確認し、フットレストに足を入れ、ゆっくりと奥へ座ってください。
- 2 フットレスト上部に手を置いて支えながら、乗り降りをおこなってください。

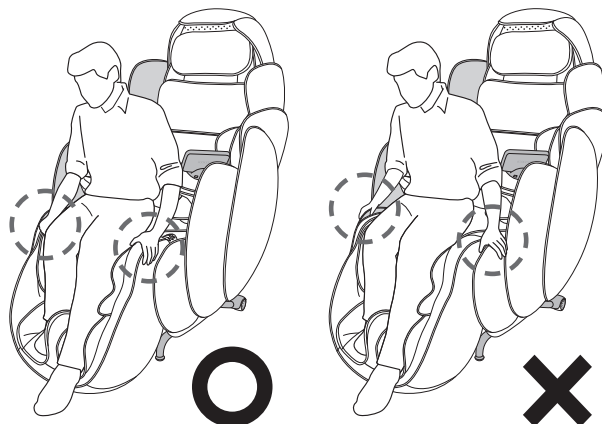

### ⚠ 警告

- サイドパネルや本体リモコンやアームレストに強い衝撃をかけたり、寄りかかったりしないでください。  
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
- 腕メカ、フットレストが動作中の場合は、動作が終わるのを待ってから椅子の乗り降りをおこなってください。
- 必ずサイドパネルが開いた状態で、椅子に座ってください

### ⚠ 注意

- フットレストが上がった状態で、フットレストの上に座らないでください。
- 各メカが動いている時の乗り降りは大変危険です。絶対におやめください。→ケガや故障の原因になります。
- 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。→キャスター受け皿使用時に体重100kgの方が座った状態で、1cmあたり約3.0kgの荷重が床面にかかります。
- ご使用前には、生地の破れがないか確認してください。●アームレストの耐荷重は約30kgです。
- アームレストの引っぱり耐荷重は約10kgです。●フットレストの耐荷重は約30kgです。



## 腕の位置

アームレストの間に腕を入れてください。

- アームレストに強い衝撃をかけたり寄りかからないでください。変形や破損の原因になります。

## 正しい腕の位置



手のひらが下向きになるように入れてください。

### 警告

- アームレスト以外のところに腕を置かないでください。  
→ケガの原因になります。


### 注意

- アームレストは、手や腕部以外には使用しないでください。  
→ケガの原因になります。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れしないでください。  
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。
- ひじをマッサージしないでください。→ケガの原因になります。

## 脚の位置

1 図のようにふくらはぎメカの間に入ってください。

2 腰深く座ってください。  
足裏はフットレストの底面についていなくても問題ありません。

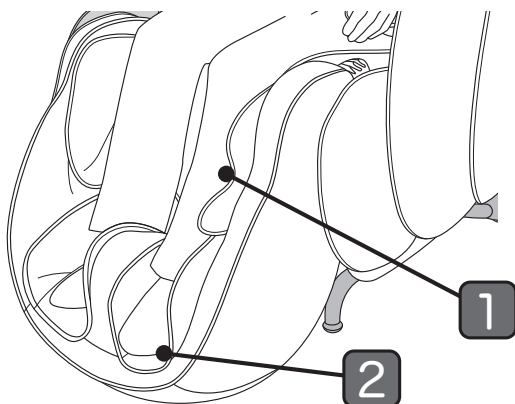

### フットスライド自動調節機能

フットスライド自動調節機能は、フットレストの足先部にあるセンサーが反応することで伸縮します。

センサーがきちんと反応するために、足裏全体をしっかりとフットレストにつけてご使用ください。

※足先がフットレストにつかないような場合は、リクライニングを動かしながら、脚に合う角度まで調節してください。マッサージコースが開始した際は、自動でフットスライドを調節します。

## つづき (マッサージをはじめる前に)

### フットレストの伸縮

フットレストが一定の高さまで上がると、伸縮できるようになります。



※およそ27cmの長さで伸縮します。

#### ⚠ 警告


- フットレストが上がった状態で、フットレストの上に座らないでください。
- フットレストを下げるときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、フットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。
- フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。
- フットスライド機能動作時、フットレストと座クッションの間に足や物をはさまないようにしてください。

#### ⚠ 注意

- フットレストは、脚部以外には使用しないでください。  
→ケガの原因になります。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。  
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。
- 膝をマッサージしないでください。他の向きで脚を入れしないでください。  
→ケガの原因になります。

### モニター的位置

背クッションの間に入っているモニターを取り出し、本体リモコンに取り付けます。モニターと本体リモコンの両方にあるマグネットでくっつきます。

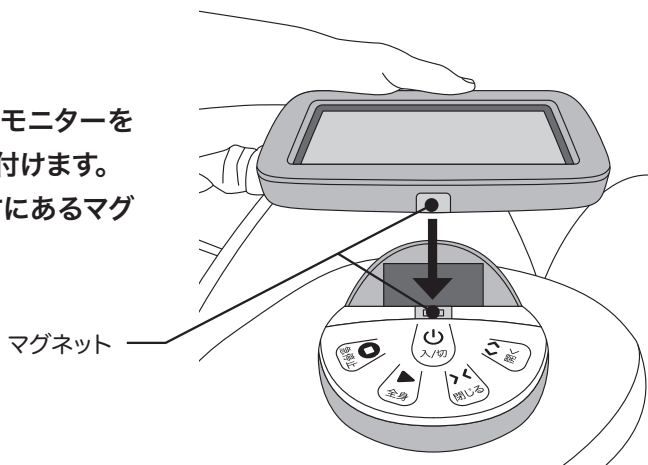


#### ⚠ 注意

- 心臓ペースメーカーなどの電子医療機器を装着している場合は使用しないでください。
- 磁気カードなどの磁気記録媒体を近づけると、データが破壊されて使用できなくなる恐れがあります。また、パソコンや電子腕時計等の精密電子機器を近づけると故障の原因になる可能性があります。
- モニターケーブルの角度調節部分を可動範囲以上に動かしたり、無理やり引っ張ったり曲げようとしてしないでください。  
→モニターケーブル内のハーネスが切れて、破損する恐れがあります。
- モニター・本体リモコンにもたれかかる、強い衝撃を与えるなど、負荷を与える行為をしないでください。  
→事故やケガ、故障の原因になります。


# モニターの使い方 (アイコンに座るまで)

## 起動方法

- 1** アイコクーン本体左後ろの主電源をONにしてください。

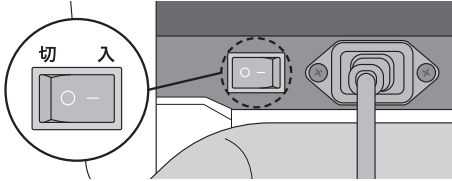

モニター画面に起動画面が表示されます。準備中は、**入/切** ボタンのLEDが緑色に点滅します。

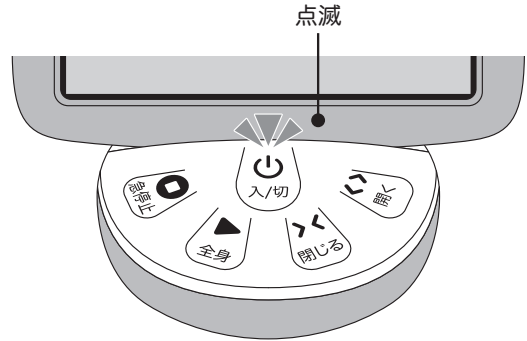

- 2** 待機画面が表示されたら、本体リモコンの**入/切** ボタンを押してください。



- 3** 電源が「入」状態になり、アイコンのパネルが開きます。電源入状態の場合、**入/切** ボタンのLEDは緑色に点灯します。その後、まくら、背クッション、座クッションに、自動でエアが入ります。



- 4** エアの準備が終了すると、ユーザー選択画面が表示されます。アイコンに座ってください。



# 初回個人設定

ユーザーの個人登録をおこなうことで、データを個別に管理することができます。


## ユーザー登録

**1** ログイン画面で「新規登録」ボタンを押してください。

- 8名まで登録することができます。



**2** 個人情報の取扱いについて内容をよくお読みの上、「同意する」ボタンを押してください。「同意しない」ボタンを押した場合、新規登録を中断し、ログイン画面へ移動します。

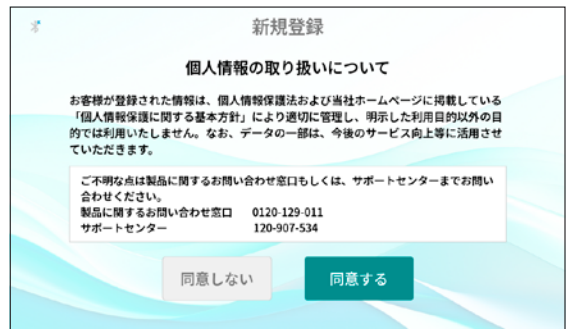

**3** 名前を入力画面が表示されます。名前を入力後、「決定」ボタンを押してください。

- カタカナ・英語 小文字に切り替えて入力することができます。



**4** 生年月日の入力画面が表示されます。生まれた年を入力後、「決定」ボタンを押してください。



**5** 生まれた月を入力後、「決定」ボタンを押してください。



**6** 生まれた日を入力後、「決定」ボタンを押してください。



7 性別の選択画面が表示されます。選択してください。

8 身長の入力画面が表示されます。身長を入力後、**決定** ボタンを押してください。

9 足のサイズの選択画面が表示されます。選択してください。

10 肩幅のサイズの選択画面が表示されます。選択してください。

11 入力した内容をご確認の上、**登録** ボタンを押してください。変更する場合は **編集** ボタンを押してください。


12 ユーザー作成が完了すると、マイポジション調整画面が表示されます。

## ユーザー情報の削除

1 ログイン画面で「ユーザー削除」ボタンを押してください。そのあと、削除したいユーザーを選択してください。



2 確認の上、「削除」ボタンを押すと削除されます。  
● 削除した場合、登録情報を復元させることはできませんのでご注意ください。

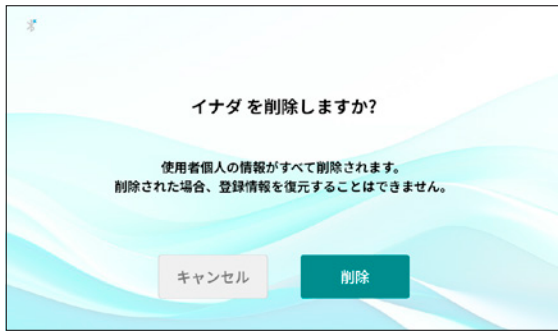

## ユーザーログイン

1 ユーザー選択画面で登録したユーザーボタンを押してください。



2 マイポジション調整画面が表示されます。画面右上の「コースメニュー」ボタンを押すと、コースメニュー画面が表示されます。



3 コースメニュー画面とマイポジション調整画面は、画面右上のボタンで、表示を切り替えることができます。





## ゲストログイン

※ゲストログインは毎回、身体情報を入力する必要があります。データは記録されません。

1 ユーザー選択画面で **ゲスト** ボタンを押してください。



2 該当する足のサイズを選択してください。




3 該当する肩幅を選択してください。



4 該当する性別を選択してください。



5 該当する身長を選択してください。選択後、**確定** ボタンを押してください。

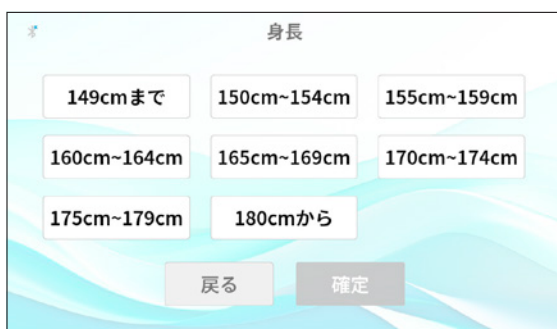

6 ゲストログインでは、ゲストコースのみお楽しみいただけます。マイポジション調整や他のコースをおこなう場合は、ユーザー登録の上、お楽しみください。




# アイコンマイポジション調整画面

## ソファとして使用する

1 登録済みのユーザーボタンを押して、ログインしてください。



2 ユーザーログインの場合、登録したマイポジションが適用されます。

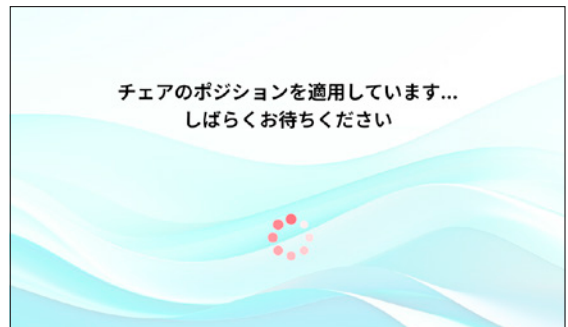

3 マイポジション調整画面が表示されます。まくら・背クッション・座クッションのエア調節量を、マイポジションとして登録することができます。



## アイコンの座り心地を、マイポジションとして登録する場合

まくら、背クッション、座クッションのエア量は、基本ポジションとして③が設定されています。お好みのポジションとなるように各クッションのエア量を選択して〔適用〕ボタンを押すと、各クッションのエア量に応じてエアを入り抜きします。

マイポジションとして登録する場合は〔登録〕ボタンを押してください。登録したマイポジションは、次回ログイン時に反映されます。

※マイポジション調整機能は、ユーザーログイン時のみ使用することができます。

### エアポジションの吸気ボタン



1回押すと、エアポジションのレベルが1段階上がります。基準③に比べ、しっかりとしたハードな座り心地になります。

### エアポジションの排気ボタン



1回押すと、エアポジションのレベルが1段階下がります。基準③に比べ、ソフトな座り心地になります。

## リクライニング

リクライニングを起こしたり、倒したりします。押している間のみ動作します。

## フットレスト

フットレストを上げたり、下げたりします。押している間のみ動作します。

## フットスライド

フットスライドを伸ばしたり、縮ませたりします。押している間のみ動作します。

## 30分間の体位変換モード開始ボタン

30分間の体位変換モード開始ボタンを押すと、30分間の体位変換モード開始画面に遷移し、腰と座に自動でエアが入る、30分間のコースを開始します。

## エア全排気

ボタンを押している間、まくらエアセル、腰左右エアセル、背クッションエアセル、座クッションエアセルなどのエアセルから、エアを抜き続けます。

※抜け具合が遅いと感じる場合は、エアセルを上から押してください。圧がかかることでエアセル内になまったエアが抜けやすくなります。

- 4** 腰(腰左エアースセル、腰右エアースセル)と、座(座前エアースセル、座左エアースセル、座右エアースセル)に自動でエアが入る、30分間の体位変換モードを開始します。  
 コース実行中は、画面上のボタンで、リクライニング角度などを調整することができます。  
 コース終了後、調整したリクライニング角度など、30分間の体位変換モード画面からマイポジション調整画面へ自動で遷移します。



### リクライニング

リクライニングを起こしたり、倒したりします。  
 押している間のみ動作します。

### フットレスト

フットレストを上げたり、下げたりします。  
 押している間のみ動作します。

### フットスライド

フットスライドを伸ばしたり、縮ませたりします。  
 押している間のみ動作します。


# アイコクーンコースメニュー

## コースメニューの種類

1 登録済みのユーザーボタンを押して、ログインしてください。



2 登録したマイポジションが適用されます。

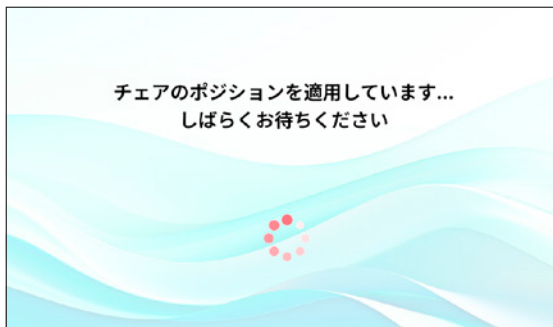

3 マイポジション調整画面が表示されます。  
コースを使用する場合は、右上の **コースメニュー** ボタンを押してください。



## 4 コースメニュー画面が表示されます。



コースメニューには、大きく2種類のコースがあります。

### ①メディテーション(3コース)(P27へ)

ファミリーイナダが考えるメディテーションとは、心と身体が調和し、リラックスすることを目的としています。エアで優しくつつみ、1/fゆらぎ等の動きをおこないます。

※「1/fゆらぎ」とは、規則性と不規則性が心地よいバランスで存在しているゆらぎのことで、人の心を落ち着かせるといわれています。

### ②マッサージ・ストレッチ(9コース)(P28へ)

マッサージ&ストレッチを行います。  
ファミリーイナダが積み重ねてきた技術を体感できます。


#### 使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす



## ① メディテーション

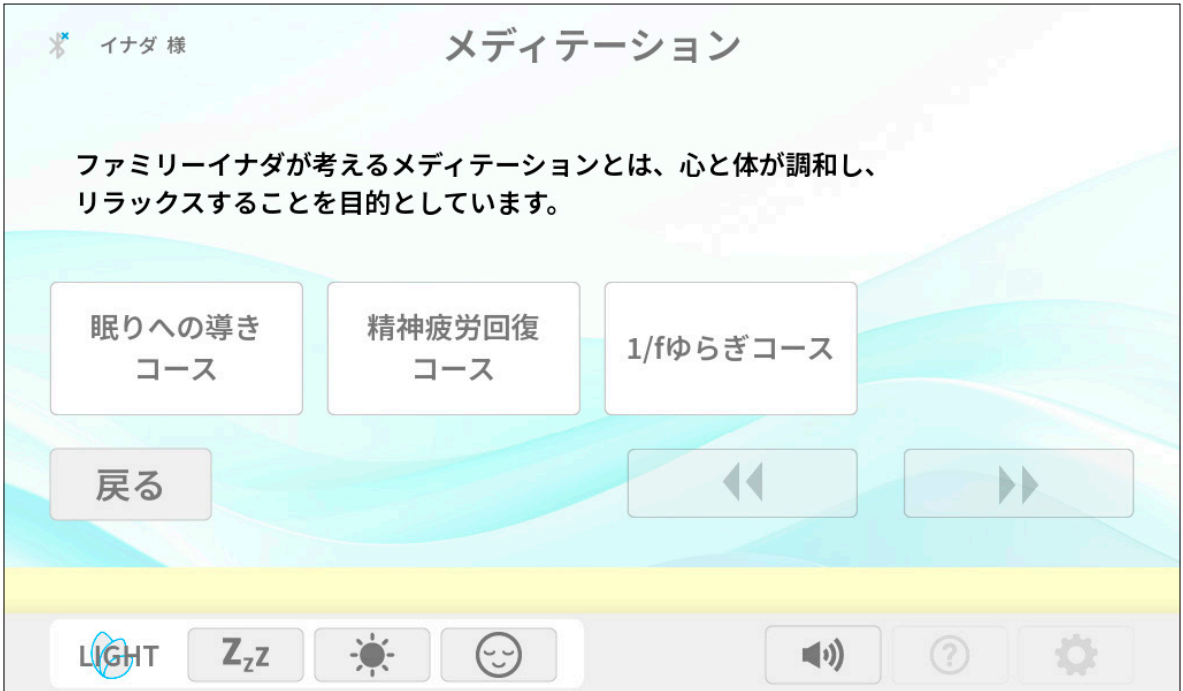

1/fゆらぎ・光・音楽とやさしい刺激を与えるマッサージ機能を駆使した Meditation で、心と身体を健康を目的とした3種類のコースが選べます。

### 眠りへの導きコース

LED  
入眠

からだ全体を軽いマッサージでほぐした後、温かい光で包み込み眠りを誘い質の良い睡眠へ導きます。

### 精神疲労回復コース

LED  
 Meditation

日常の疲れで凝り固まった筋肉を緩めてリラクゼーションを促進し、 Meditation の効果をアップさせることを目的としています。

### 1/fゆらぎコース

LED  
 Meditation

1/fの不規則な心地よい揺らぎにより心身の緊張を解きほぐし、深いリラクゼーションへと導きます。

※「1/fゆらぎ」とは、規則性と不規則性が心地よいバランスで存在しているゆらぎのことで、人の心を落ち着かせると言われています。

## ② マッサージ・ストレッチ



### ゲストコース

LED

入眠

アイコンの特徴的な動き（極上のマッサージと心身を安らぎに導くメディテーション）を世界観と共に体感することができるコースです。



### 姿勢ストレッチ

LED

覚醒

身体の柔軟性と動きの範囲を向上させ、筋肉の緊張を和らげ、心身のリラクゼーションを促進することを目的としたコースです。




### マッサージ

目的に応じた、5種類のコースを選ぶことができます。(P29へ)

### 子ども

10歳以上の若年層の方を対象にした、2種類のコースを選ぶことができます。(P32へ)

## ② マッサージ・ストレッチ

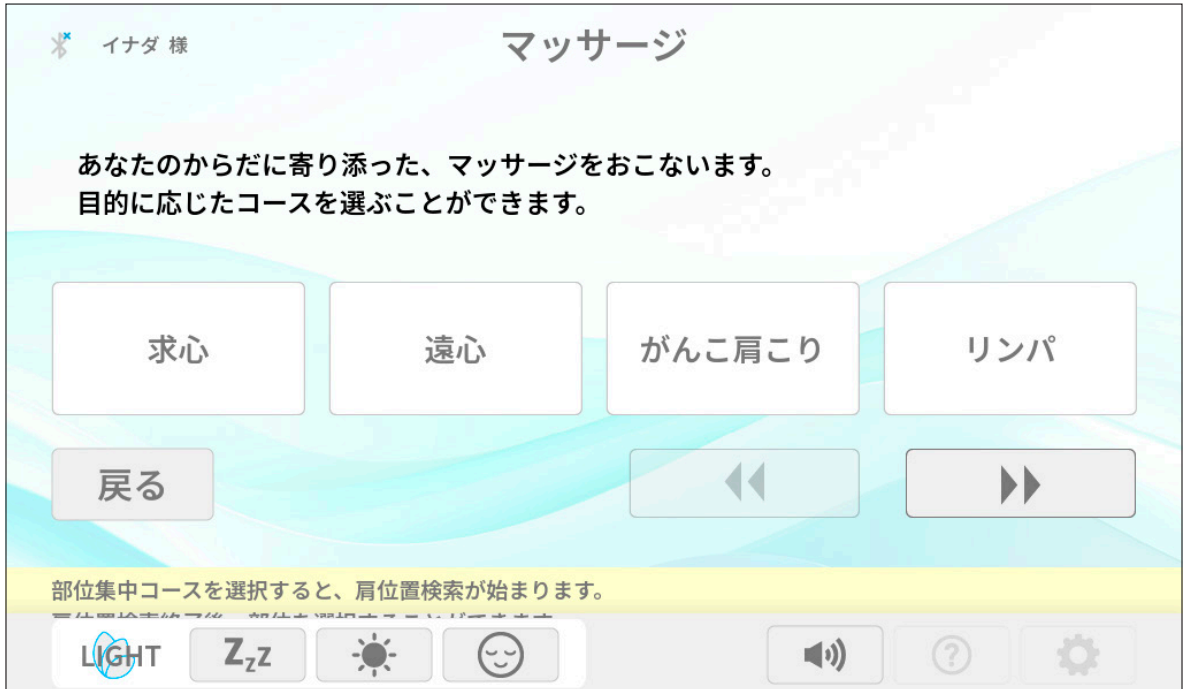

### 求心

LED  
覚 醒

古代ヨーロッパで生まれた「マッサージ」の考えを取り入れた技法で、身体の末端から心臓へ向けて血流を促します。末端から心臓に血行を促進し疲労回復を促し、新陳代謝を高めて身体をリフレッシュさせます。

### 遠心

LED  
入 眠

古代中国で生まれた「あんま」の考えを取り入れたマッサージの技法で、心臓から身体の末端へ向けて血行を促進し、末端まで血液を巡らせ、リラックスさせます。

### がんこ肩こり

LED  
覚 醒


肩こりの原因と言われる肩甲挙筋を中心に、凝り固まった肩周辺の筋肉をほぐすコースです。首と肩の表面の筋肉を緩めてから、しっかりとしたもみ心地でアプローチします。

### リンパ

LED  
覚 醒

リンパの流れに合わせて、ゆっくりとしたリズムでマッサージするコースです。

## ② マッサージ・ストレッチ

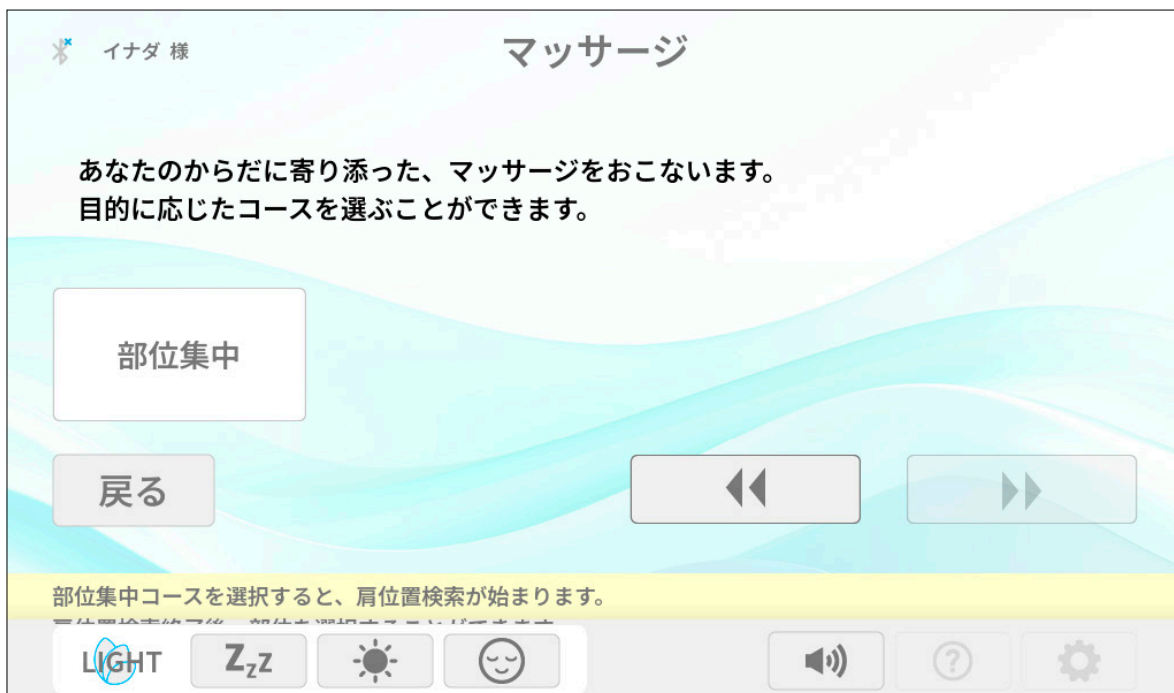

### 部位集中

脚や腰など、部位に特化して、集中的にマッサージをおこないます。


※他の部位と組み合わせることはできません。※同一箇所への長時間のマッサージは推奨しておりません。

※このコースでは、お好みのLEDを選択して、お楽しみください。


- 1 部位集中ボタンを押すと、自動でリクライニングが倒れ、フットセンシングと肩位置検索をおこないます。



## 2 肩位置検索後、部位集中の部位選択画面が表示されます。 部位を選択すると、自動で選択された部位のコースが開始します。

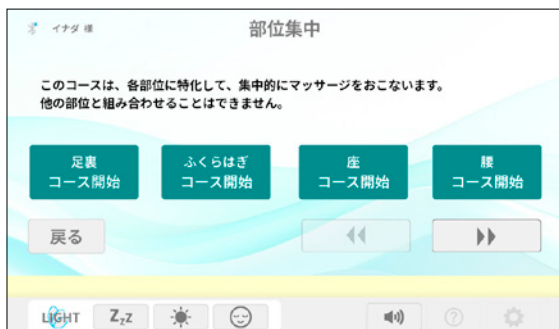

## ② マッサージ・ストレッチ

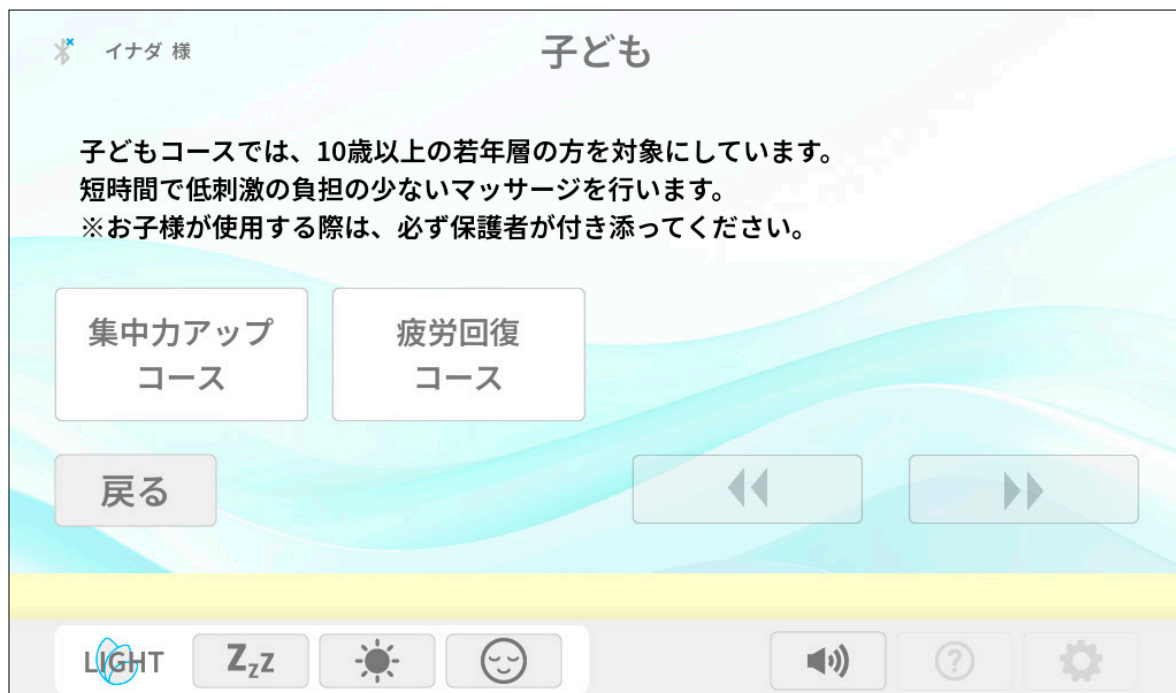

### 集中力アップ

LED

覚 醒

鳥取大学医学博士 深田美香教授との共同研究結果を活用した若年層の集中力をアップさせるコースです。

<共同研究の概要>

マッサージ前後を比較し、マッサージ後は、計算問題の回答所要時間が短縮し、正答回答数が増加しました。

※当社の従来機種での実験データによるものです。

### 疲労回復

LED

入 眠

子どもと成人では、体格だけでなく、骨格のかたちや筋肉量が異なります。

体格の違いを認識した上で、ソフトなもみ心地のマッサージをおこない、日々の疲れやストレスを癒したり、スポーツ後の筋肉をほぐすことを目的としています。

### ⚠ 注意

●子どもコースは10歳以上の人を対象としたコースです。必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。また、対象年齢以下のお子様はご使用にならないでください。



# コースを使ってみよう

## マッサージをおこなう

1 お好きなコースボタンを選択してください。




2 コース概要の説明画面が表示されます。お好きなコースボタンを押してください。

※コースの種類によっては、コース概要の説明画面が無い場合もあります。



3 コース詳細の説明画面が表示されます。コースを開始する場合は **コース開始** ボタンを押してください。

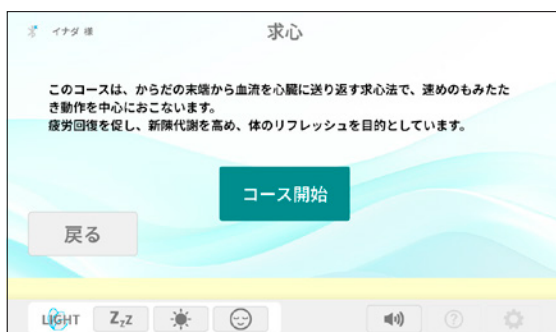

4 コース開始後、自動でリクライニングが倒れます。



## つづき (コースを使ってみよう)

- 5** フットセンシングをおこないます。  
フットレストが縮んでいきますので、ひざを伸ばしてください。  
足裏センサーが反応すると自動でフットレストが伸縮しますが、画面上のボタンでも調整することができます。



- 6** フットセンシング終了後、背メカが上昇し、肩位置検索をおこないます。肩位置の調節が必要な場合は、画面上の **上げる** **下げる** ボタンで肩位置をあわせてください。



# 7 コースを開始します。コース実行中は、画面上のボタンで、強さ調節やリクライニング角度などを調節することができます。



## 強さ調整

コース中にマッサージが強い／弱いと感じた場合、強弱を調節できます。

## フットレスト

フットレストを上げたり、下げたりします。押し続けている間のみ動作します。

## ヒーター

足先ヒーターと座面ヒーターの **ON** / **OFF** が選択できます。

## 背もたれ

背もたれを起こしたり、倒したりします。押し続けている間のみ動作します。

## フットスライド

フットスライドを伸ばしたり、縮ませたりします。押し続けている間のみ動作します。

## 自動起き上がり

コース終了後、自動でリクライニングを起こすか選択できます。**OFF** にすると、コースが終了しても、自動でリクライニングは起き上がりません。

ゲストログイン中は自動起き上がり **ON** 固定です。



## サブボタンメニュー

✧ イナダ 様

### マイポジション調整

🪑 コースメニュー

縮む		膨らむ
↓	3	↑
↓	3	↑
↓	3	↑

適用
登録

リクラ イニング	フット レスト	フット スライド
▲	▲	伸▶
▼	▼	◀縮

30分間の体位変換モード  
開始

エアー全排気

iCOCOONのエア量を調整できます。

LIGHT
Z<sub>z</sub>Z

## サイドパネルLED(光パターン)

サイドパネルのLEDを、3種類の目的に応じた光パターンで、光らせます。

～ 入眠モード ～ ねむりを促すモード

Z<sub>z</sub>Z

入眠を目的とした、光パターンです。

光の色 暖色光(橙色)

光の制御 明～暗(徐々に暗くなります。)

～ 覚醒モード ～ 目覚めを促すモード

覚醒を目的とした、光パターンです。

光の色 白色光

光の制御 暗～明(徐々に明るくなります。)

～ メディテーションモード ～ 落ち着いた状態を促すモード

メディテーションを目的とした、光パターンです。

光の色 暖色光(赤～橙色)

光の制御 ろうそくの炎のようなゆらめきを演出します。

## サブボタンメニュー

### 音量

音量の設定を10段階でおこなうことができます。




- + 音量を1つあげます     - 音量を1つ下げます
- 消音     コース中の音声のみ、消音します
- 戻る 音声ダイアログを閉じます

### ガイド

ユーザー登録・マイポジション・コースメニューなどが表示されます。  
モニターに対して、縦長に表示されます。

ご確認の際は、モニターを本体リモコンから取り外してを90度傾けてから、  
ご確認ください。

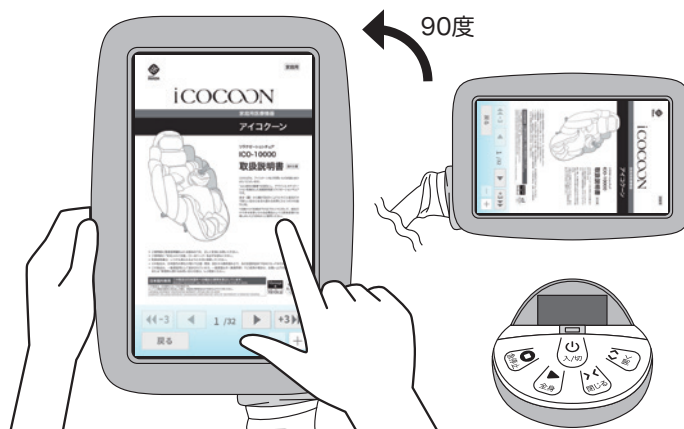

## サブボタンメニュー

### 設定

各種設定画面に遷移します



### ユーザー情報修正

登録したユーザー情報を修正することができます。



### Bluetooth® 設定


お手持ちの機器とアイコンーン本体を接続することができます。(接続設定は取扱説明書P39～42をご覧ください)

# Bluetooth® 設定

アイコンとお手持ちのデバイスをBluetooth® 接続することで、アイコン本体のスピーカーからお好みの音楽などを流すことができます。

※Bluetooth® 接続しても、モニターの画面に静止画や動画を表示することはできません。

## アイコンとデバイス (スマートフォン等) を、Bluetooth® 接続する

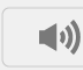- 1 アイコンとお手持ちのデバイスをBluetooth® で接続します。  
フッターにあるサブボタンメニューの「設定」ボタン  を押してください。



- 2 Bluetooth ボタンを押してください。  
Bluetooth® 設定画面が表示されます。



- 3 デバイスを操作して、Bluetooth® 機能をONにします。  
【例:スマートフォンの場合】


[設定]を選択します。



[Bluetooth®]を  
選択します。



[Bluetooth®]を  
オンに切り替えます。

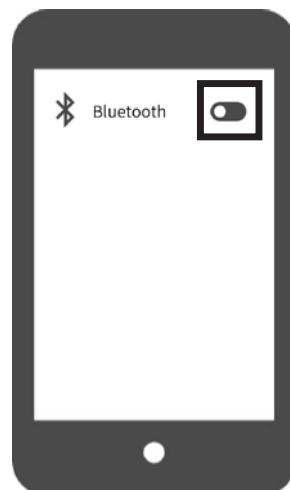

※お使いの機種によって、[Bluetooth®]の表示は、[機器接続]などの場合もあります。

※お使いのデバイスによって画面表示内容は変わる可能性があります。



## つづき (Bluetooth® 設定)

### 4 アイコーンに新しくデバイスを登録する場合は、**デバイス登録** ボタンを押してください。アイコンがBluetooth® 接続モードに切り替わります。

※アイコンのBluetooth® 接続モードは60秒間です。



### 5 デバイスを操作して、アイコンをデバイスへ登録します。

【例:スマートフォンの場合】


Bluetooth® 接続確認が表示される場合は、**[ペア設定する]**を選択してください。



[新しい機器とのペア設定する]を選択します。接続可能なデバイスの検索が開始されます。



接続可能なデバイスが一覧で表示されます。iCOCOON\_XXXXXX (製造番号6桁)を選択してください。

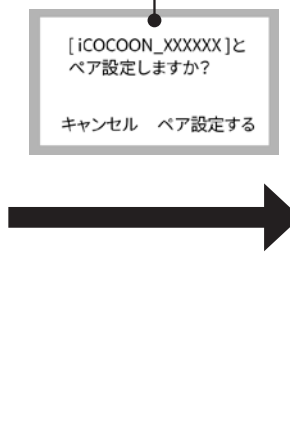

スマートフォン上に、iCOCOON\_XXXXXXが、「登録されたデバイス」や「接続済み」として表示されると、登録完了です。

※お使いの機種によって、Bluetooth® 機能がONに切り替わると、自動で、接続可能な機器を検索します。

※表示されない場合は、再度検索をおこなってください。

※製造番号の数字6桁は、社銘版(本体リモコンに貼り付け。P48参照)に記載されている、製造番号の数字と同じです。

※お使いのデバイスによって画面表示内容は変わる可能性があります。

## 6 Bluetooth® 接続が完了すると、自動で画面が切り替わり、登録されたデバイス名が、[ペアリング中のデバイス]として、Bluetooth® 設定画面に表示されます。

- ユーザー毎に、デバイスを1台登録することができます。ユーザー1人に対して、登録できる端末は1台です。
- 登録したデバイスは、次回ログイン時に自動でアイコンに接続されます。




## アイコンのスピーカーから、デバイスの音楽を再生する

Bluetooth® 設定画面にデバイス名が表示されたことを確認後、好きな音楽などをデバイスから再生してください。

### 【例：スマートフォンの場合】

好きな音楽再生プレーヤーアプリや動画アプリを選択します。

好きな音楽や動画を選択して、再生してください。Bluetooth® 接続が完了していると、アイコン本体のスピーカーから音楽などが流れます。

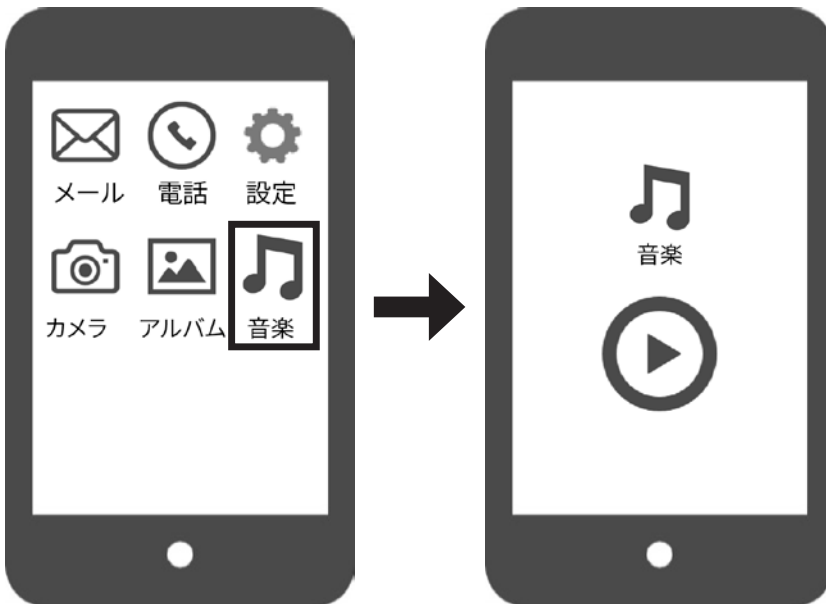

- Bluetooth® 接続したデバイスから流す音源の音量のみ調整したい場合は、お手持ちのデバイス进行操作してください。

## アイコンとデバイス (スマートフォン等) のBluetooth® 接続を切断する

### 切断ボタン

Bluetooth® 設定画面の **切断** ボタンを押してください。Bluetooth® 接続のみ切断することができます。

デバイスは、[ペアリング中のデバイス]として、Bluetooth® 設定画面に保存されています。




再度、アイコンとデバイスを接続する場合は、**接続** ボタンを押してください。

Bluetooth® 再接続を自動でおこないます。

## アイコンから登録済みのデバイス (スマートフォン等) を削除する

### 削除ボタン

Bluetooth® 設定画面の **削除** ボタンを押してください。Bluetooth® 設定画面から、登録済みのデバイスを削除することができます。

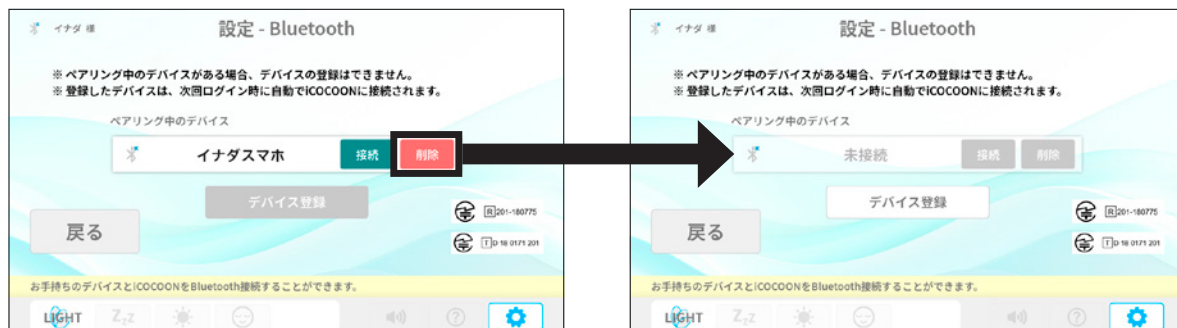

再度、アイコンとデバイスを接続する場合は、**デバイス登録** ボタンから、デバイスの登録をして、Bluetooth® 接続をおこなってください。

# お手入れと保管のしかた

## お手入れの仕方

### ⚠ 注意

- お手入れの際は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

### 本革部分

- 掃除機などでほこりやよごれを取り除き、うすめた洗剤をやわらかい布に含ませ、よごれをふき取ります。  
本革製品のお手入れには、できれば革専用のクリーナーやコンディショナーの使用を推奨します。
- 水を浸した布を固くしぼり、表面に残った洗剤をふき取ります。  
乾いたやわらかい布で表面の水分をふき取り、風通しのよい日陰で乾燥させてください。
- 品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。

### ～注意～

皮革の表面の劣化や損傷を避けるために次のことをお守りください。

- 革に付着したほこりやよごれはすぐに取り除いてください。
- 直射日光に長時間さらさないようにしてください。
- ビニール製/プラスチック製/ワックス含有のものは、高温になると革に張り付くおそれがあるため、革張りの上に置かないでください。

### 適しているもの



### 適していないもの



### その他プラスチック部分

- 少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

### モニター部分

- モニターについてよごれは、乾いた布で拭き取ってください。
- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。故障の原因になります。

## 保管のしかた

### ⚠ 注意

- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

本体はよごれやホコリを取った後、湿気・ホコリの少ない場所に保管してください。長い間ご使用にならない場合は、カバーなどをかけてホコリが付かないようにしてください。

- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。

# Q&A

**Q** フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

**A** 設置しても大丈夫です。

ただし、床を傷つけることがあるかもしれませんので、カーペットを敷き、その上にアイコクーンを設置することをおすすめします。(畳等も同様です)

また、ホットカーペットは発熱体を傷め、そこから発火するおそれがありますので使用しないでください。

**Q** 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

**A** 感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。

- 本体後側の主電源スイッチを切ってください。
  - 電源プラグをコンセントから抜く。
- 以上のことをおこなった上、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)へご相談ください。

**Q** マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

**A** 次のことをおこなってみてください。

- マッサージ中に画面に表示される強さ調節ボタンで調節する。
  - 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。
- 以上の方法でより強くマッサージをおこなうことができます。

**Q** マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

**A** 次のことをおこなってみてください。

- マッサージ中に画面に表示される強さ調節ボタンで調節する。
  - まくらを置く。
- 以上の方法でより弱くマッサージをおこなうことができます。

**Q** 体重が重くても大丈夫ですか？

**A** 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

**Q** 身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？

**A** お使いいただけます。

**Q** 利用者の年齢制限はありますか？

**A** 小さなお子様や自分の意思で操作できない方は安全上ご使用になれません。

ただし、子どもコースに限り、10歳以上のお子様も使用することができます。

その場合、必ず保護者が付き添ってください。

また、高齢者の方で80歳以上になると骨粗しょう症の危険性が高くなりますので、ご使用前に医師にご相談ください。

**Q** 1日にアイコクーンは何回乗ってもいいですか？

**A** マッサージは1人あたり、1日1回(30分または、15分を2回等)を目安にしてください。

チェアメニューを使用する場合は、これ以上使用しても問題ありません。

**Q** フットスライド調整機能がうまく作動しません。(フットレストが足裏に合っていない)

**A** 足先部分にあるセンサーが反応するよう、足裏全体をフットレストにつけてお座りください。足先がつかないような場合は、フットスライドボタンで調節することができます。

**Q** 本体リモコンで、[開く]ボタン、[閉じる]ボタンを押しても、サイドパネルが動きません。

**A** ご確認ください。アイコクーンが以下の動作をおこなうときは、サイドパネルの操作を制限しています。

- 電源切状態
- アイコクーン準備中
- 収納動作中
- マイポジション実行中

**Q** 本体リモコンで、[全身]ボタンを押しても、マッサージが開始しません。

**A** ご確認ください。アイコクーンが以下の動作をおこなうときは、操作を制限しています。

- 電源切状態
- アイコクーン準備中
- 収納動作中
- マイポジション実行中

**Q** 急停止中に、アイコクーンのリクライニングを起こしたい場合は、どうすればいいですか？

**A** 急停止中に入/切ボタンを押すと、リクライニングが自動で起き上がります。



**Q** 主電源が入っているのに、自動的にモニターの画面が真っ暗になりました。

**A** 一定時間操作がない場合、モニター画面は自動消灯をおこないます。ご確認ください。

<電源切状態>

● 待機画面

約3分間無操作の場合、モニター画面のバックライトが消灯します。

復帰する場合は、入/切ボタンを押してください。

<電源入状態>

● マイポジション調整画面

約5分間無操作の場合、モニター画面のバックライトが消灯します。

復帰する場合は、モニター画面をタッチしてください。

● 30分ポジション実行中画面

約5分間無操作の場合、モニター画面のバックライトが消灯します。

復帰する場合は、モニター画面をタッチしてください。

※電源入状態で、入/切ボタンを押すと、待機画面に遷移し本体の電源が切れます。ご注意ください。

**Q** サイドパネルが突然閉まりました。

**A** 本体が電源切状態に移行し、待機画面で約1分間無操作の場合、サイドパネルが閉まります。電源切状態に移行後、すぐにサイドパネルは閉まりませんので、アイコンから降りる際は、焦らずにゆっくりと降りてください。

アイコンを椅子として使用する場合は、マイポジション調整画面での利用をおすすめします。

**Q** Bluetooth® を使用していると、テレビ、携帯電話に雑音が入ります。

**A** ご確認ください。

- 雑音が入る機器とアイコンの距離を離す。
- 雑音が入る機器とアイコンの電源をそれぞれ別の場所から取る。

**Q** Bluetooth® を複数台接続できませんか？

**A** ユーザー1人に対して、デバイスを1台登録することができます。既に登録済みのデバイスがある場合、新しくデバイスを追加登録することはできません。登録済みのデバイスを削除し、新しいデバイスを登録してください。

**Q** Bluetooth® がつながりません。

**A** 設定をご確認ください。

- アイコクーンと Bluetooth® 機器の距離が遠すぎるとうまくペアリング設定できません。アイコンに Bluetooth® 機器を近づけてください。
- Bluetooth® 機器の状態を確認してください。
  - ①電源がオンになっているか確認してください。電池式の場合は、電池が切れていないか確認してください。
  - ②その後、Bluetooth® 機器を再起動してください。
- Bluetooth® が ON になっていることを確認してください。
- 接続したい Bluetooth® 機器のペアリングをいったん解除して、あらためて接続設定してください。
- 接続したい機器とは別の機器が Bluetooth® 接続されていませんか。他の機器が接続中の場合は、切断し、接続したい機器に切り替えてください。

**Q** Bluetooth® の接続が切れました。

**A** ご確認ください。アイコンと Bluetooth® 接続したデバイスは、以下の場合に、自動で接続が切れます。再接続する場合は、Bluetooth® 設定画面から「接続」ボタンを押して、再接続してください。

- Bluetooth® 接続したデバイスが、Bluetooth® 接続圏外へ移動した場合
- アイコクーンと Bluetooth® 接続しまま、電源切状態になった場合

**Q** Bluetooth® の音楽が、アイコン本体のスピーカーから流れません。

**A** ご確認ください。アイコンと Bluetooth® 接続したいデバイスが、既に他の Bluetooth® 機器（ヘッドホンやイヤホンなど）と接続している場合、アイコン本体のスピーカーから音楽が再生されない場合があります。その際は、デバイスと他の Bluetooth® 機器との接続を解除してから、もう一度、アイコンとの Bluetooth® 接続をお試しください。


**Q** 故障時にどの程度の故障だと、追加費用が必要になりますか？

**A** 『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までお問い合わせください。

通常使用以外の使用方法や過度なご使用があった場合に、追加費用が発生することがあります。

# 故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までご相談ください。

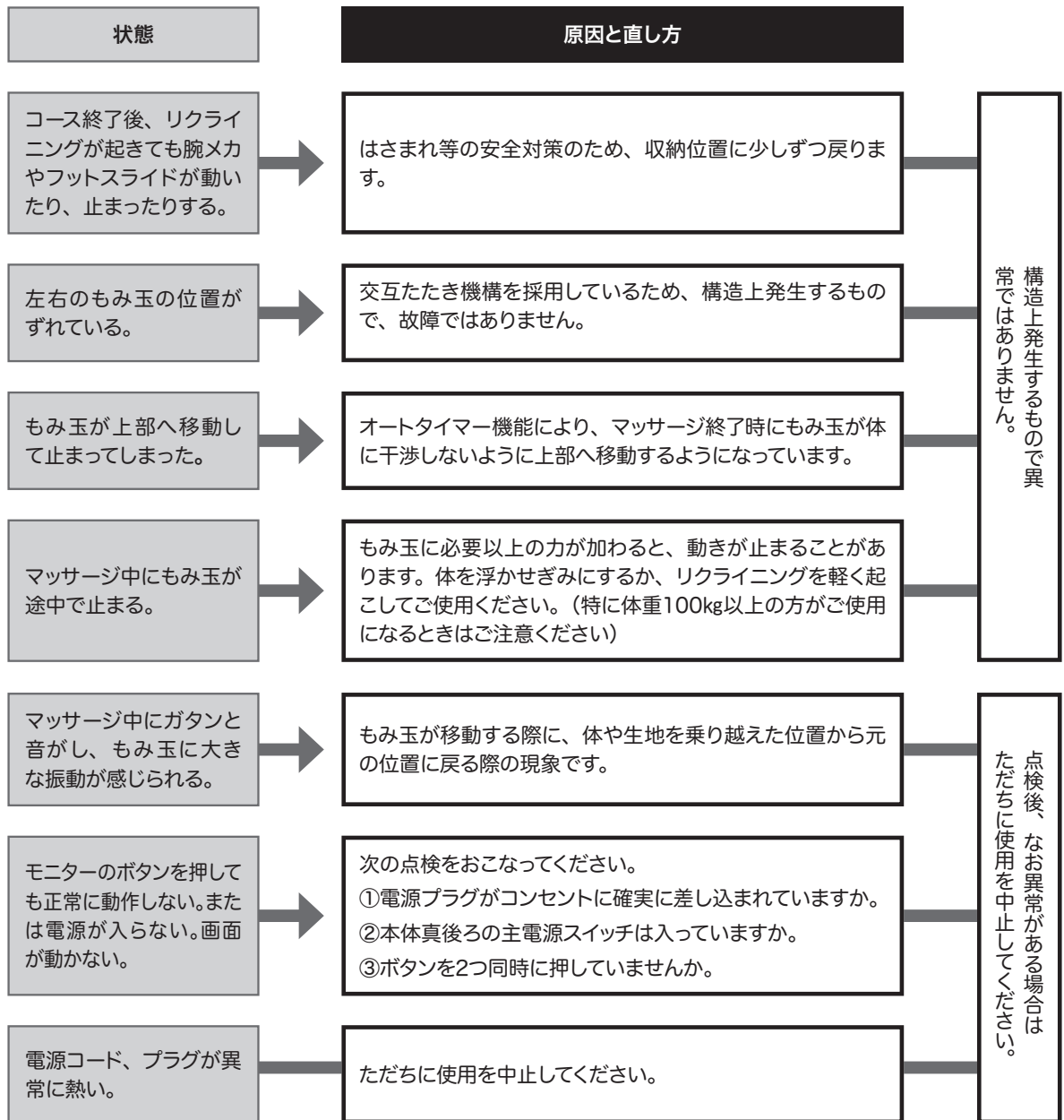

『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までご相談ください。

サービスマン以外の方は分解や修理はおこなわないでください。



## 動作時の音について

ご使用中に下記のような作動音がしますが、構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

- たたきを伴う動作時の音 ▶ (ゴトゴト音・カタカタ音)
- もみ動作時のもみ玉と布のすれる音 ▶ (キュッキュツ音・ギューギュー音)
- もみ玉の昇降、もみ動作時の音 ▶ (ウィーン音・ゴロゴロ音・コトツ音)
- エアーマッサージ中の音 ▶ (コツコツ音)
- エアープンプの音 ▶ (ブーン音)
- エアの排気音 ▶ (シュー音)
- リクライニング昇降時の音 ▶ (ウィーン音)

※上記の音について、性能等に影響はありません。



### 警告

- 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に連絡してください。  
→ 火災や感電、ケガの原因になります。



### 注意

- 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。  
→ 感電や漏電・ショート等による火災のおそれがあります。

# 保証とアフターサービス

## 1.保証書について

この製品の保証書は取扱説明書についております。保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。(修理の際、必要となります。) お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は本書にかならず貼り付け大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より5年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外(業務用など)でご使用の場合は、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。


## 2.修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、46ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。確認後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店もしくは「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)へ、次のことをご連絡、ご依頼ください。

なお、有償保守サービスとなる場合がありますので、内容をよくお読みください。

- (1) お名前・ご住所・お電話番号
- (2) 販売名…この取扱説明書の49ページの仕様欄、または、本体リモコンに貼ってある社銘板をご覧ください。
- (3) 製造番号…本体リモコンに貼ってある社銘板をご覧ください。
- (4) お買い上げ日(または設置日)
- (5) 故障の状態(できるだけ詳しくお知らせください。) 画面上にエラーコードが表示されている場合は、コードの数字を伝えてください。

### 社銘板の位置

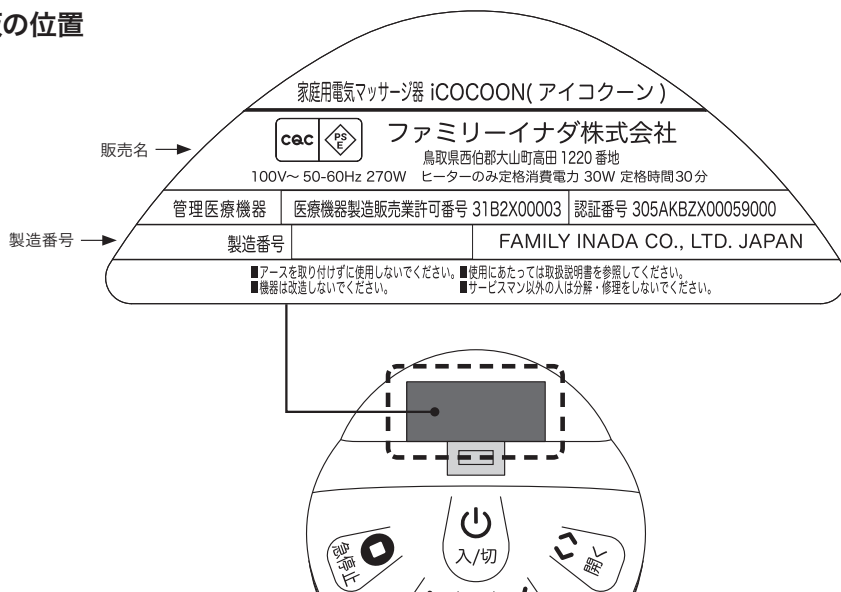

- 保証期間中は、修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有償になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間が過ぎている場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理させていただきます。
- 日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)にお問い合わせください。
- 販売店にご依頼になれない場合は、「修理等に関するお問い合わせ窓口」(裏表紙に記載)にご連絡ください。

# 仕 様

販 売 名	iCOCOON (アイコクーン)		
使 用 電 源	AC100V		
定 格 消 費 電 力	270W (ヒータ使用時) ヒータのみ30W		
定 格 周 波 数	50-60Hz		
定 格 時 間	30分		
電 撃 対 する 保 護 の 形 式	クラス0Ⅰ機器		
上 半 身	背 上 メカ	も み 速 さ	最小約5回/分、最大約20回/分
		た た き 速 さ	最小約165回/分、最大約450回/分
自 動 コ ー ス	11種類		
部 位 別 選 択 コ ー ス	7種類		
エ ア ー 圧 力	約35kPa		
フ ッ ト レ ス ト 調 節 範 囲	約27cm		
リ ク ラ イ ニ ン グ 角 度	水平面に対して約110°～約164°無段階 (電動リクライニング)		
本 体 の 寸 法	幅約95 (125) cm×奥行約155 (240) cm×高さ約150 (95) cm 奥行・高さの ( ) 内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時 幅の ( ) 内の数字はサイドパネル可動域の最大値		
重 量	約145kg		
外 装 生 地	本革		
付 属 品	電源コード・T型レンチ・キャスター受け皿×2		
包 装	2梱包/1台		
類 別	機械器具 (77) バイブレーター		
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000) 管理医療機器		
医 療 機 器 製 造 販 売 業 許 可 番 号	31B2X00003		
医 療 機 器 認 証 番 号	305AKBZX00059000		
製 造 販 売 元	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地		
製 造 元	ファミリーイナダ株式会社		

# 安全のために商品の点検を

## 長期ご使用の場合は商品の点検を

### こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、『修理等に関するお問い合わせ窓口』に点検をご依頼ください。



### 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、お買い上げ後、お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』に定期点検をご依頼ください。

※お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

## ●ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名	TEL		

## ●領収書またはお買い上げ証明書 貼付欄

(キリトリ線)

## 保証規定

- 保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。
  - 修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
  - お買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご連絡ください。
  - ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入のお買い上げ店が無償修理をお受けになれない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
  - (1) お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
  - (2) 火災・天災・異常電圧等による故障・損傷の場合
  - (3) 機器を改造や修理された場合
  - (4) 取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって発生した故障・損傷の場合
  - (5) 本保証書を提示されない場合
  - (6) 本保証書のお買い上げ店名、およびお買い上げ年月日の未記入あるいは字句を訂正された場合
  - (7) 一般家庭以外(業務用等)でご使用されていた場合
- 本保証書は日本国内において有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書の記載内容については『修理等に関するお問い合わせ窓口』(取扱説明書に記載)にご相談ください。


修理メモ

ファミリーイナダ株式会社

※This warranty is valid only in Japan

## お客様相談窓口のご案内

- 製品に関するお問い合わせ窓口

 0120-129-011

- 修理等に関するお問い合わせ窓口

 0120-772-294

受付：土・日・祝を除く平日 9：00～17：00

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



# ファミリーイチャイ株式会社

<https://www.family-chair.co.jp>

※「商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがあります。  
(モニター画面のデザインを含む)」

(キリトリ線)

### ファミリーイチャイ 保証書

品番	ICO-10000	製造番号	
お客様	お名前 様		
	ご住所 □□□□-□□□□		
	電話 ( )		
	お買い上げ店名 住所・電話番号		
お買い上げ日	保証期間	5年間	
	保証対象	本体	

- 正常なご使用状態(取扱説明書に記載)で万一発生した故障については、お買い上げ日から上記の期間、裏面の保証規定により、その故障の修理料金を無償といたします。
- 本保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 製造番号は、かならずご記入ください。
- お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は、本書にかならず貼り付け、大切に保管してください。